


**亲可视看护版
使用手册
(最新版)**

1 APP 下载

安卓手机用户可通过应用宝搜索“亲可视看护版”进行下载安装


2 用户注册

用户第一次使用亲可视 APP,需进行如下步骤进行用户注册: 在登录页面点击新用户注册->输入手机号->获取验证码->输入验证码->输入密码->勾选协议->点击确定.如下图所示:

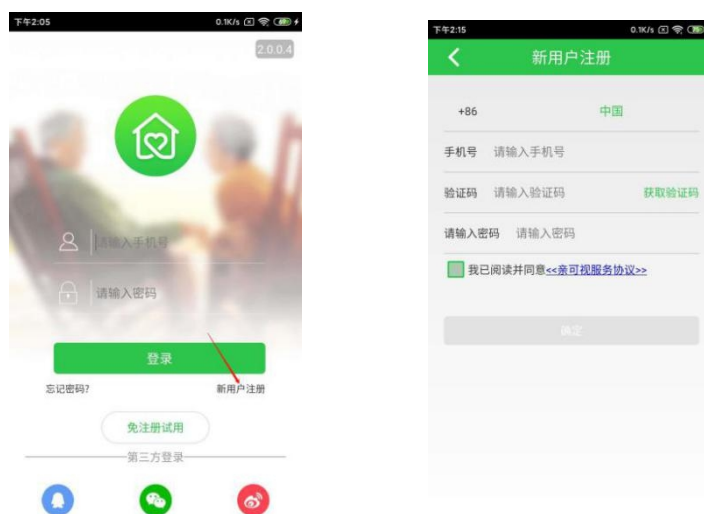

3 添加关心的人（使用设备的老人,信息必填但可以不正确）

添加关心人的步骤如下:点击主页的健康数据->点击添加关心的人->输入相应的基本信息->点击确定.步骤下图所示:

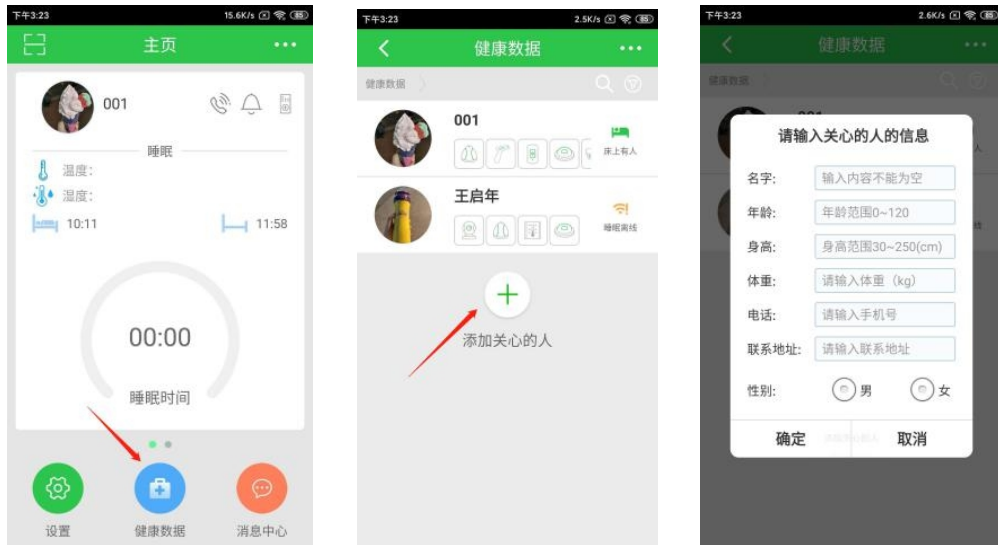

4 添加网关（三角形白色设备，背面有二维码）


扫码添加网关的步骤：打开亲可视 APP->点击右上角的...->选择扫码添加->将网关的二维码对准扫码框->点击添加。如下图所示：



5 添加智能床垫


打开亲可视 APP->点击右上角的...->选择手动添加->选择睡眠监测仪->点击自动搜索->找到 A1GTXXX 的设备->点击下一步->点击添加

操作如下图所示：

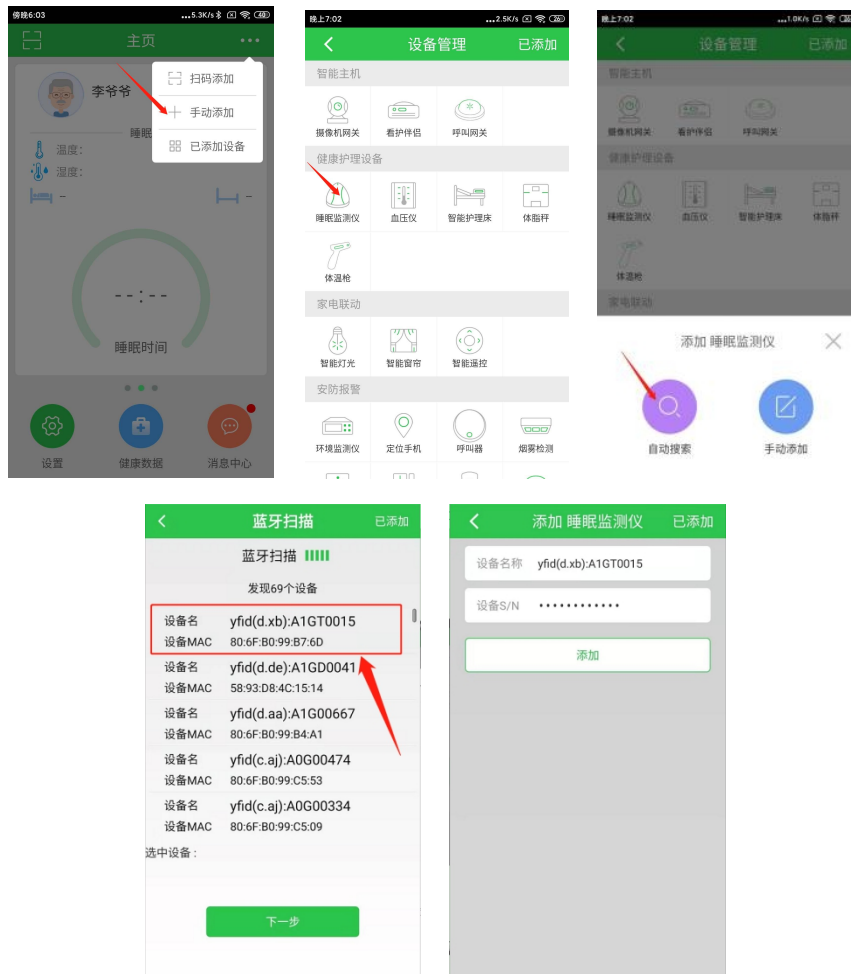

6 添加呼叫器（门磁，燃气，烟感等设备步骤类似）


添加呼叫器的步骤为：扫描呼叫器设备的二维码-->点击添加-->选择需要绑定的网关主机-->绑定关心的人

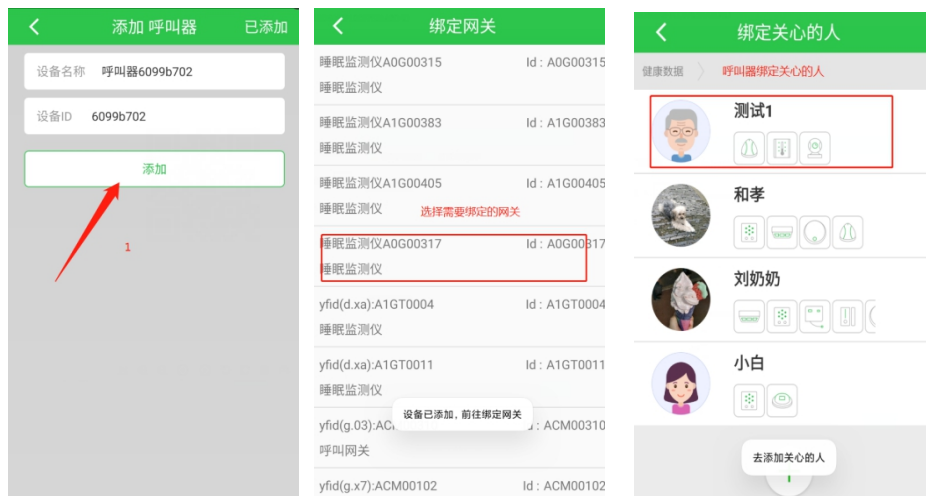

如果呼叫器是通过手动添加进去的，那么绑定网关的步骤为：点击右上角的...-->选择已添加设备-->找到呼叫器-->点击该呼叫器-->点击设置按钮-->选择绑定到网关-->选择我们要绑定的网关即可。

提醒：如果该呼叫器也没绑定用户，记得绑定一下

图示步骤如下：

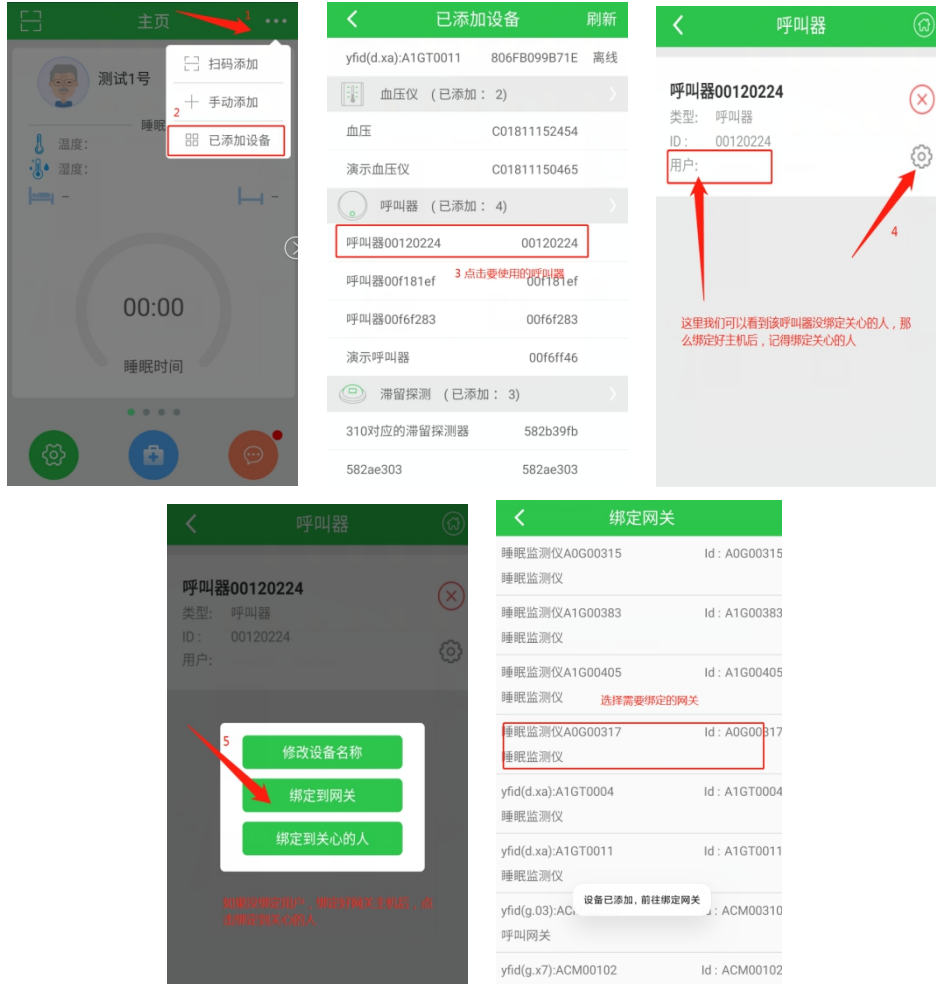


7 设置电话号码(智能语音伴侣与智能护理床)

智能语音伴侣 (A1GDXXXX)

智能护理床 (A1GTXXXX)


添加呼叫器的步骤为：打开亲可视 APP->点击右上角的...->选择已添加设备-->找到并点击 A1GDXXXX(或者 A1GTXXXX)的设备->点击设置->选择手机号设置->分别设置三个电话号码->点击配置。图示步骤如下：

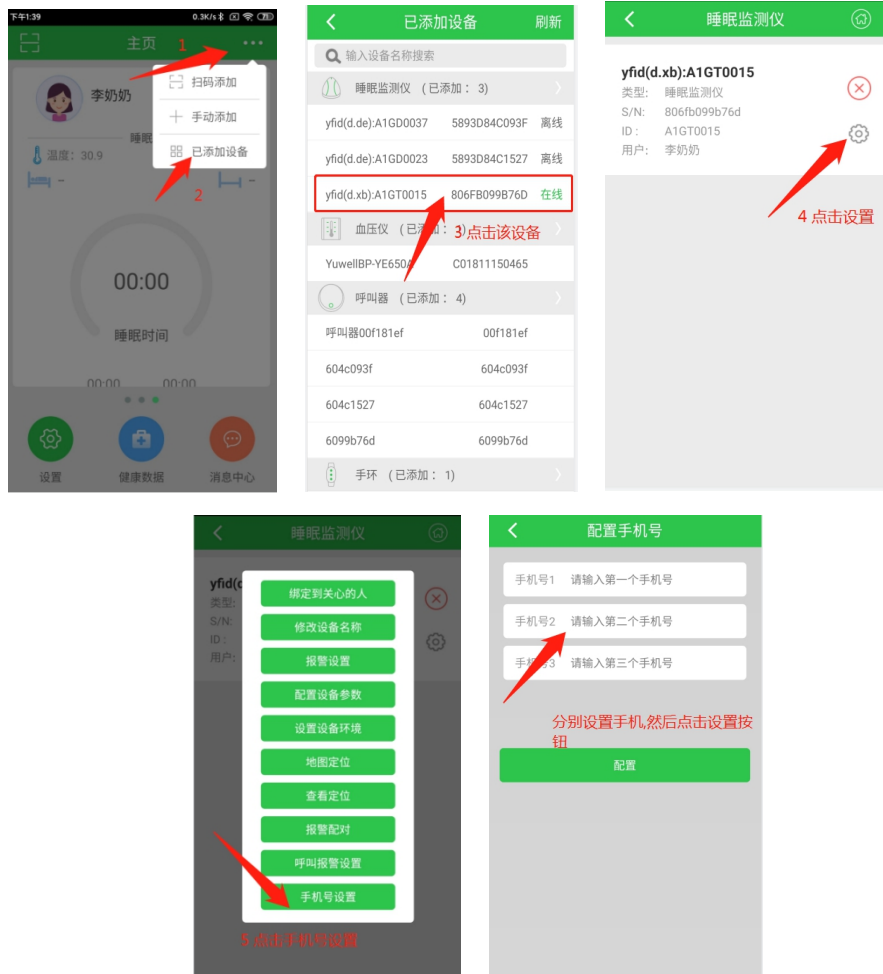

8 设置提醒以及报警

8.1 设置睡眠仪的提醒及报警


操作步骤：点击关心人的头像->切换到推送配置->打开相应的开关->点击保存
图示步骤如下：

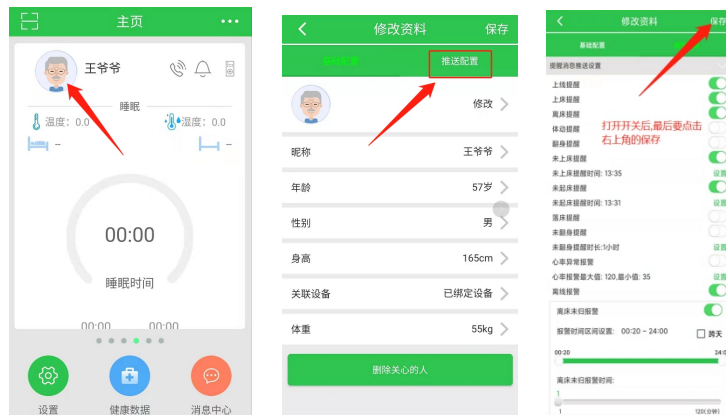

8.2 设置呼叫消息推送

操作步骤: 点击关心人的头像->切换到推送配置->向下滑动->点开呼叫消息推送配置->打开相应的开关(开关显灰色代表关心人未绑定该类型的设备)->点击保存

图示步骤如下:

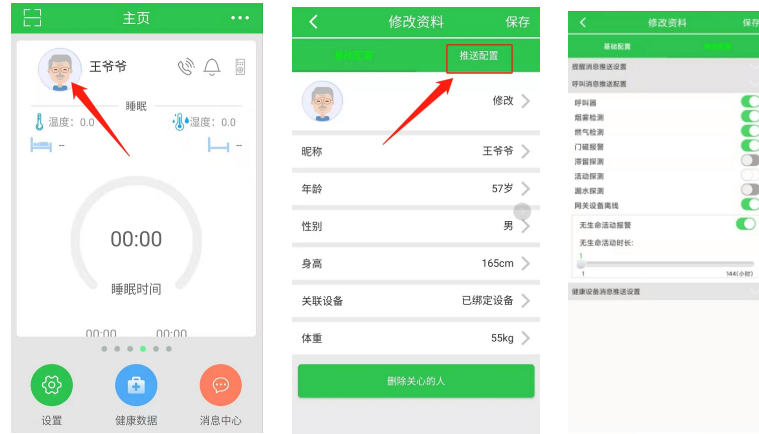

9 控制智能床垫

关心人绑定萤石摄像头,可以在控制智能床垫页面查看监控图像.

操作步骤: 在主页点击遥控器标志->进入到控制页面. 如下图所示:

