

亲可视 4G 网关

使用指南

尊敬的用户，欢迎您选用本产品，在使用本品之前，请务必仔细阅读操作指南，并保存此操作指南以备后续参考。

免责声明：本产品不属于医疗器械，体征数据仅供参考，不可用于医学诊断。

1 外观介绍



1：电源接口； 2：指示灯

您可以通过下表，检查 4G 网关是否正常工作：

状态灯	设备动作
红灯闪烁	设备初始化，连接网络
出现 1-2 次紫色灯 闪烁结束后熄灭	网络连接成功，开始正常工作
红灯持续慢闪烁(1s)	网络信号弱，无法注册成功

2 设备安装

打开包装盒，取出本品，将电源线插入主机电源口（插入 DC 口），接通电源，同时观察指示灯状态。

3 软件安装 (目前只支持安卓系统)

打开手机任意浏览器,使用扫描功能,扫描包装盒内的二维码,下载并安装,根据提示完成注册。(若盒内无相应二维码,可在应用宝搜索“亲可视看护版”下载)。



(版本 2.0.3.4)

4 设备使用

1、扫描二维码添加设备 (设备 ID 号为 A1G5XXXX,上电后 30s 左右设备会上线)

将设备接通电源,在软件主界面,点击左上角的扫码框(或依次点击右上角“...”->“扫码添加”),当弹出二维码扫描页面,将手机对准设备底部的二维码,扫描后弹出设备添加页面。

添加成功后,绑定关心的人,设备上线使用。



2、配置消息提醒以及各设备的报警开关

在“软件主页面”，点击“用户的头像”，切换到“推送配置”，可根据需求设置提醒消息，当睡眠主机监测到事件异常时，手机端即可收到消息提醒信息；向上滑动可看到“呼叫消息推送配置”，打开可配置相应的报警器开关(开关按钮显示灰色，代表该关心人未添加此类型设备；另外门磁和活动探测的开关，默认是关闭状态)




5 呼叫设备

1、手动添加呼叫器(烟感,燃气,漏水等)

点击 app 主页右上角的“...”，选择“手动添加”，选中“呼叫器”，输入“呼叫器 ID” -> 点击“添加”即可。如图所示：



点击“添加”后-->在绑定网关页面选择绑定的网关-->选择要绑定的人。

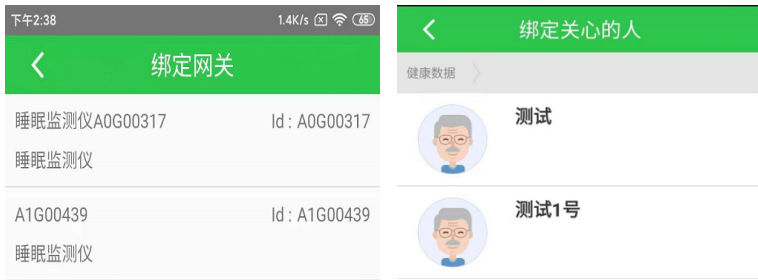

6 健康设备

1 添加血压仪

点击 app 主页右上角的“...” ->选择“手动添加” ->在健康护理设备栏选择“血压仪” ->选择“自动搜索” ->找到 Yuwell BP (鱼跃) 开头或以 BP (脉搏波) 开头的设备 ->点击下一步 ->点击添加。



2 添加体温枪

点击 app 主页右上角的“...”，选择“手动添加”，在健康护理设备栏选择“体温枪”，选择“自动搜索” ->找到 AOJ 开头的设备 ->点击下一步 ->点击添加。



7 设备升级

点击“主页左下角的设置” -> 选择“帮助” -> “睡眠固件更新”，如有新版本发布，用户点击升级固件即可（升级时请勿断电）。



8 常见问题解答

1 手机 APP 接收不到告警信息？

先检测设备是否接通电源，再检测设备是否显示在线。若设备离线，可尝试拔电再重新接通电源(此动作可让设备重启)。同时检查报警布防时段是否与报警时间匹配。并检测当前用户是否绑定 4G 网关。

2 亲可视 APP 显示设备离线，且重启后仍不上线？

观察指示灯状态，若一直闪烁红灯（持续时间 45S 以上）/蓝灯或闪烁紫灯，表示设备异常，请与供应商联系。

9 规格参数

产品名称	亲可视 4G 网关
产品组成	4G 网关主机+电源线+电源插头
传感器	高灵敏度压电薄膜
通信方式	支持有线版（结构定制）
健康管理	与血压计、体温枪联动，后台采集健康数据并记录
供电方式	DC 5V/1A 电源，无电池设计，免维护

数据对接	支持第三方对接
主机尺寸	93*91*22mm
包装尺寸	190*180*80mm
整机重量	200g (包括包装)