

# 亲可视红外电子体温枪、 血压仪近场测量

## 使用指南


尊敬的用户，欢迎您选用本产品，在使用本品之前，请务必详细阅读操作指南，并保存此操作指南以备后续参考。

免责声明：本产品不属于医疗器械，体征数据仅供参考，不可用于医学诊断。

# 1 红外电子体温枪

## 1 添加体温枪


点击 app 主页右上角的“...”，选择“手动添加”，在健康护理设备栏选择“体温枪”，选择“自动搜索”->找到 AOJ 开头的设备->点击下一步->点击添加->绑定到关心的人

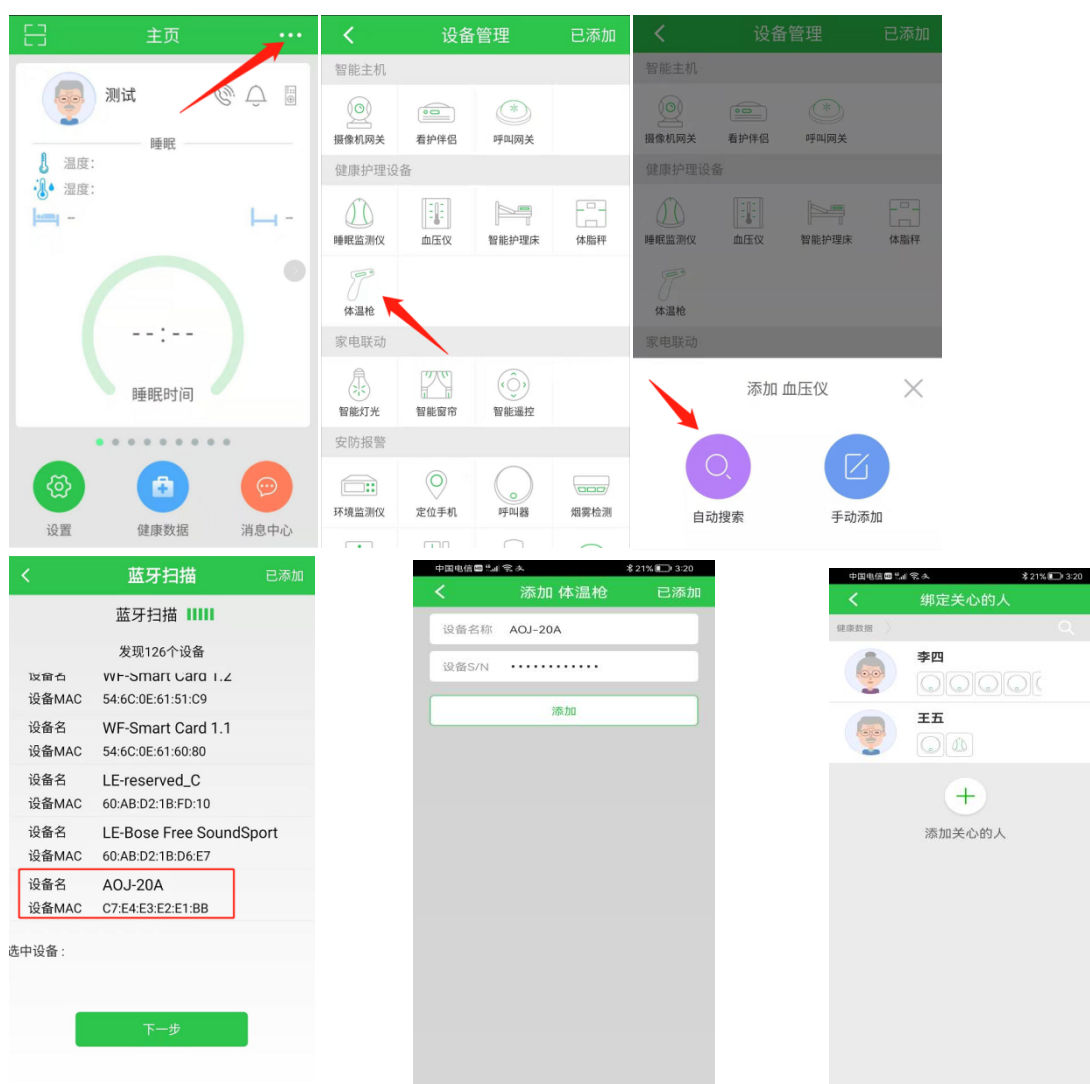

当有多位老人同时使用体温枪时，可按照以下方法绑定到关心的人。



点击 app 主页右上角的“...”，选择“已添加设备”->点击体温枪->点击左

下角齿轮图标->选择绑定到关心的人

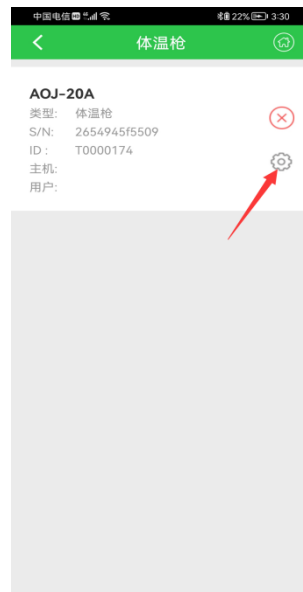

## 2 使用近场测量

打开 app-->点击健康数据-->在健康数据页面点击右上角的...-->选择体温枪-->点击开始,然后用体温枪测量-->等待页面体温数据出来-->等待 5s,点击指派-->选择本次测量的老人.

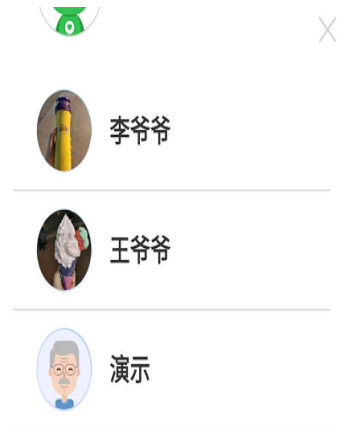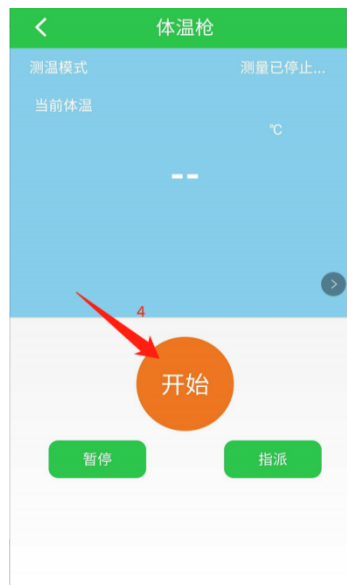

选择本次测量的老人


## 2 血压仪

### 1 添加血压仪

点击 app 主页右上角的 “...” -> 选择 “手动添加” -> 在健康护理设备栏选择 “血压仪” -> 选择 “自动搜索” -> 找到 Yuwell BP (鱼跃) 开头或以 BP (脉搏波) 开头的设备 -> 点击下一步 -> 点击添加 -> 绑定到关心的人




或

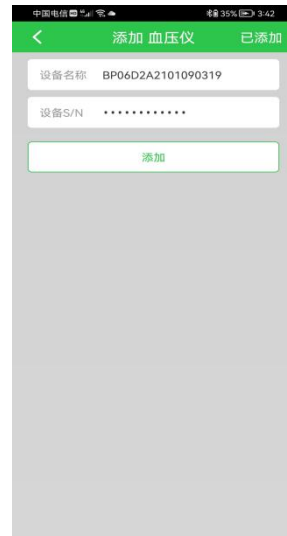



当有多位老人同时使用血压仪时，可按照以下方法绑定到关心的人。

点击 app 主页右上角的 "...", 选择 "已添加设备" -> 点击血压仪-> 点击左下角齿轮图标-> 选择绑定到关心的人

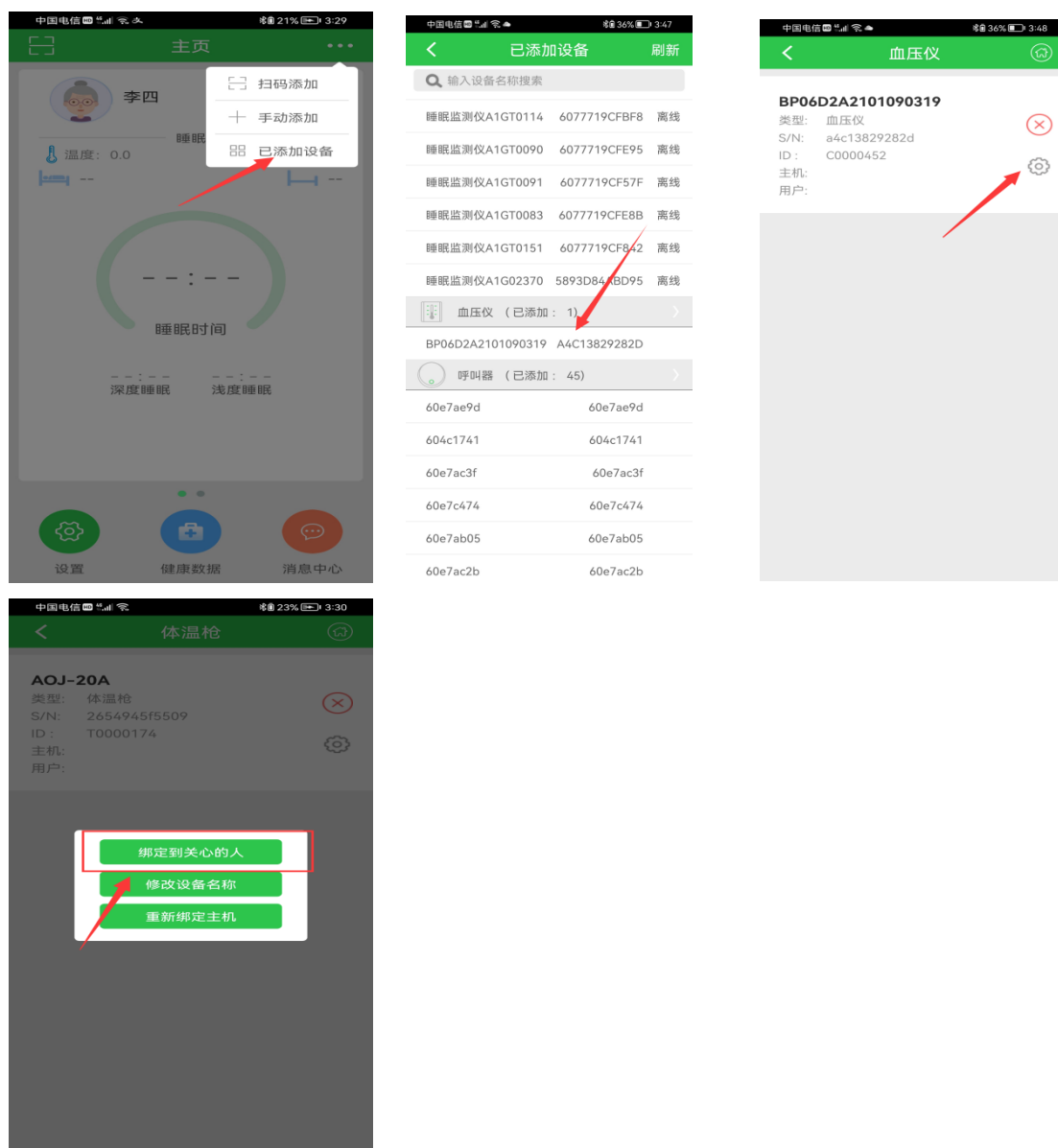

## 2 使用近场测量

打开 app---> 点击健康数据--> 在健康数据页面点击右上角的...--> 选择血压仪--> 此时需要点击一下血压仪的开始按钮, 在蓝牙扫描界面找到血压仪并点击--> 进入到血压仪界面. 点击页面的开始按钮, 同时点击血压仪上的开始. 等到页面提示血压仪连接成功--> 让老人佩戴好血压仪, 开始测量--> 测量完点击指派--> 选择本次测量的用户.

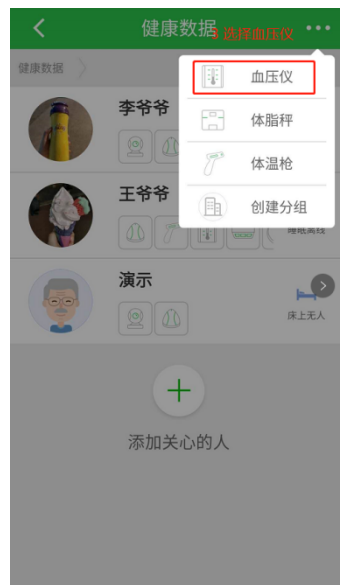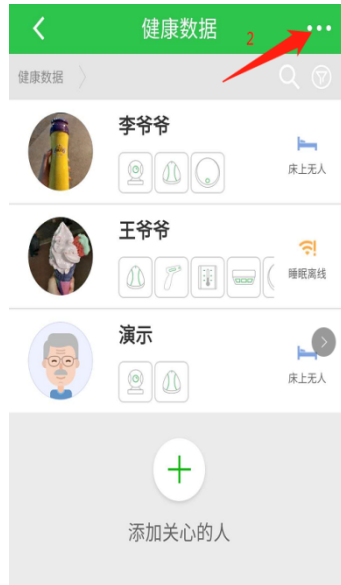

选择本次测量的老人

# 4 场景演示

---

## **场景一：居家使用**

当老人家中有亲视网关产品时，可配备一套体温枪、血压仪供多位老人使用。如有社区员工，亦可由该员工随身携带一套体温枪、血压仪上门为社区内的多户老人使用。

## **场景二：机构使用**

养老机构可根据实际情况，给多位老人分配同一台体温枪、血压仪（需配合亲视网关产品使用）。